

A-PRF + Blutentnahmeröhrchen 10ml - Anleitung

Dieser Artikel ist ein Einmalprodukt und nicht wiederverwendbar.
Das Blutentnahmeröhrchen wird für die A-PRF+™ -Vorbereitung verwendet.
Das Blutentnahmeröhrchen ist steril, mit Vakuum, ohne Zusatzstoffe oder Antikoagulantien.
Einzelverpackung.

A-PRF[™]
CHOUKROUN



Verfahren:

- Blutentnahmeröhrchen aus der Verpackung entnehmen.
- Achten Sie auf die Unversehrtheit der Verpackung. Wenn das Paket geöffnet oder beschädigt ist, entsorgen Sie es bitte und nehmen ein intaktes Produkt.
- Stecken das Blutentnahmeröhrchen in den Butterfly Adapter.
- Das Blutentnahmeröhrchen wird gefüllt und stoppt automatisch, wenn es voll ist (Vakuümöhrchen). Fassungsvermögen: 10 ml.
- Entfernen Sie das Blutentnahmeröhrchen und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn die gewünschte Anzahl von Röhrchen erreicht ist, stellen Sie diese in die Zentrifuge.
- Die Röhrchen sind zum Zentrifugieren bereit. Um die RPM und die Dauer der Zentrifugation einzustellen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir geben Ihnen die für Ihre Zentrifuge angepassten Einstellungen.


Hinweis: Nach Beendigung des Vorgangs A-PRF + sind die gebrauchten Röhrchen sofort in die dafür vorgesehenen Behälter zu stellen.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Die ordnungsgemäße Funktion dieses Artikels ist nur gewährleistet, wenn die Anweisungen befolgt werden.
 - Nehmen Sie keine Maßnahmen vor, die den Artikel beeinträchtigen könnten.
 - Überprüfen Sie die Unversehrtheit der einzelnen Produkte, bevor Sie die Verpackung öffnen.
- Wenn die Verpackung beschädigt ist, nicht verwenden.
- Bei Kontakt mit der Nadel oder Verletzungen ärztlichen Rat einholen.
 - Die Wiederverwendung des Produkts ist streng verboten. Dieses kann zu gefährlichen Ansteckungen oder sogar zum Tod führen.
 - Bei Hämophiliepatienten, Epileptika, etc. ist besondere Aufmerksamkeit bei der Blutentnahme erforderlich.



1. Nehmen Sie das Blutentnahmeröhrchen A-PRF +™.

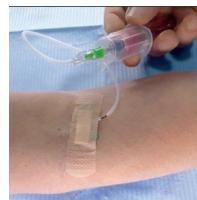

2. Blut entnehmen bis Sie die erforderliche Anzahl von Blutentnahmeröhrchen erhalten haben.




3. Die Blutentnahmeröhrchen in die Zentrifuge stellen

LOT Chargennummer

 Herstellungsdatum

 Einmalprodukt Nicht wiederverwendbar

CE

 Verfallsdatum Produkt kann bis zum Ende des Monats verwendet werden

STERILE R Gamma-Sterilisation

Nicht toxisch - Nicht pyrogen