

A-PRF + Tubul 10ml Instrucțiuni

Acest dispozitiv este pentru unica folosință/utilizare. A nu se reutiliza.
Acest tub pentru colectarea sângelui este folosit pentru prepararea A-PRF+.
Tubul este steril, vidat, fără (nu conține) aditivi sau/si anticoagulanți.
Ambalat individual.

A-PRFTM
CHOUKROUN



Procedura (Protocol de lucru)::

- Scoateți tubul din ambalajul sau.
 - Asigurați-va ca ambalajul este intact/integru (nedeteriorat). Dacă ambalajul este deschis sau deteriorat, va rugăm să îl aruncați (sa nu îl utilizați) și să folosiți un alt produs care este ambalat corespunzător (intact).
 - Scoateți tubul din holder.
 - Tubul este vidat și se umple automat până la nivelul maxim necesar. Capacitate: 10 ml.
 - Îndepărtați tubul și conectați-l pe următorul. Când s-a obținut numărul dorit de tuburi, introduceți-le în centrifuga.
 - Tuburile sunt gata (pregătite) pentru centrifugare. Pentru a seta viteza și durata centrifugării, va rugăm să ne contactați.
Va vom furniza/livra setările adaptate centrifugii dvs.
- N.B.: Când ați finalizat procedura de pregătire A-PRF+, va rugăm să introduceți imediat tuburile folosite în containerul furnizat special pentru acest scop.

Precauții:

- Funcționarea corespunzătoare a acestui dispozitiv este condiționată de respectarea instrucțiunilor de utilizare.
- Nu efectuați manevre/manopere care ar putea afecta negativ dispozitivul
- Verificați integritatea ambalajelor individuale înainte de utilizare. Dacă constatați nereguli, evitați utilizarea lor.
- În cazul unei răniri (înțepare cu acul), solicitați consult și tratament medical competent.
- Reutilizarea acestor produse este absolut interzisă; poate cauza infecții deosebit de grave sau/si deces.
- În cazul pacienților hemofilici, epileptici etc. sunt necesare măsuri speciale în timpul recoltării.



1. Pregătiți tubul colector A-PRF+™.





2. Efectuați recoltarea; umpleți numărul de tuburi necesar.




3. Introduceți tuburile în centrifuga

LOT Număr Lot

 Data producției

 Produs de unică folosință.
A nu se reutiliza.

CE

 Data expirării: Produsul poate fi utilizat până la finalul lunii

STERILE R Sterilizat cu raze Gamma

Non-toxic, Non-pirogenic