

i-PRF + Tubes 10ml Instructions

Ce dispositif est un produit à usage unique, il ne doit pas être réutilisé.
Ce tube de prélèvement sanguin est utilisé pour la préparation du i-PRF™
Le tube de i-PRF™ est stérile, sous vide, sans additifs ni anticoagulants.
Il est contenu dans un emballage unique.

i-PRF
CHOUKROUN



Procédure :

- Sortir le tube de prélèvement sanguin de son emballage
- Assurez-vous de l'intégrité de l'emballage, si l'emballage est déjà ouvert ou endommagé, veuillez le jeter et prendre un produit intact.
- Branchez le tube dans le corps de pompe
- Le tube se remplit et s'arrête automatiquement lorsqu'il est plein (tube sous vide) . Contenance 10 mL.
- Débranchez le tube et passer au suivant, lorsque le nombre de tubes désiré est atteint, les placer dans la centrifugeuse.
- Les tubes sont prêt à être centrifugés. Pour la vitesse de rotation et le temps de centrifugation, nous contacter.
Nous vous communiquerons les réglages adaptés à votre centrifugeuse.


NB: Lorsque la procédure i-PRF est terminée, veuillez mettre les tubes usagés dans les containers prévus à cet effet.

Précautions :

- Le bon fonctionnement de ce dispositif, n'est assuré que si les instructions d'utilisation sont respectées
- Ne faites aucune action qui pourrait porter atteinte au dispositif.
- Vérifier l'intégrité de l'emballage individuel avant utilisation, si l'emballage est endommagé, ne pas utiliser.
- En cas d'exposition lors d'une blessure demander un avis médical.
- La réutilisation du produit est strictement interdite, elle peut entrainer des infections dangereuses pour la santé, voir même la mort.
- Dans le cas de patients, hémophiles, épileptiques etc., une attention particulière s'impose lors du prélèvement.



1. Munissez-vous des tubes de prélèvement i-PRF™

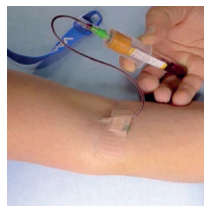



2. Réalisez le prélèvement sanguin, remplissez le nombre de tubes nécessaires




3. Placez les tubes dans la centrifugeuse.

LOT Numéro de lot

 Date de fabrication

 Dispositif à usage unique
Ne peut pas être réutilisé

CE

 Date de péremption : Le produit peut être utilisé jusqu'à la fin du mois indiqué

STERILE R Stérilisation aux rayons gamma

Non toxic - Non pyrogenic